

動物用非接触式赤外線体温計

1	2	3	4	5	6	7
赤外線導波管	赤外線センサー	LEDライト	ペットボタン	+/-ボタン	ホームボタン	ディスプレイ



## ご使用方法

①保護キャップを開けます。



②  ホームボタンを押したまま、動物の正面に近づけます。

※スムーズに測定を行うには、動物が落ち着いている必要があります。



③動物に近づけると二つの半円が見えます。眼の真ん中で半円が繋がって円になれば、ペットボタンから指を離せば、体温がディスプレイに表示されます。


適切な距離になれば、正円ができます




半円の調整例



近すぎる  
場合

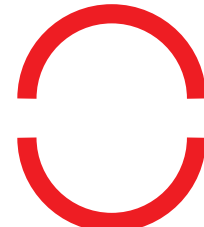

遠すぎる  
場合

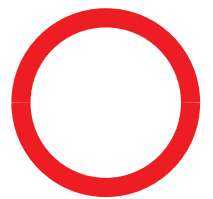


正 常

## 電池の交換方法


①コインなどを差し込みます



②矢印方向へひねります

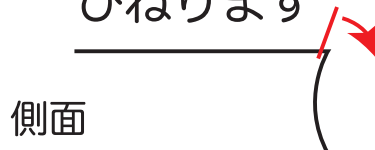

③カバーを外し電池を交換します

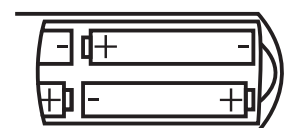

※カバーは硬く出来ています、無理やり開けず上記の方法で行ってください