

BS-余剰ガスクリーナーⅡ

製品説明

BS-余剰ガスクリーナーⅡは、吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。

付属の自動はかりに吸着缶を載せて缶の重量を1g単位で正確に表示します。リアルタイムで重さを計量しながら使用するので、重さをメモする必要がありません。他に類を見ない仕組みで吸着缶を取り替えるタイミングを逃しません。



自動はかり
重量測定器



余剰ガス吸着缶
(小/250g)



余剰ガス吸着缶
(大/800g)

特徴

☆大小のサイズがあり、使い捨てでとても便利です。

☆ワンタッチで簡単にセットできます。

☆吸着缶を交換するタイミングを2回のアラームでお知らせ

- ・1回目：大型吸着缶は1000-1020gで、小さい吸着缶は300-310gに達すると音と表示でお知らせ
- ・2回目：大型吸着缶は1020-1500gで、小型吸着缶は310～500gに達すると音と表示でお知らせ
- ・重量が1500gを超えると1秒間のアラームでお知らせ

☆コンパクトで省スペース

BS-余剰ガスクリーナーⅡ

仕様

【容量】

ガス吸収缶(大/800g): 吸収量200~240g

ガス吸収缶(小/250g): 吸収量50g

【アラーム】

- ・1回目: 大型吸着缶は1000-1020gで、小さい吸着缶は300-310gに達すると音と表示でお知らせ
- ・2回目: 大型吸着缶は1020~1500gで、小型吸着缶は310~500gに達すると音と表示でお知らせ
- ・重量が1500gを超えると1秒間のアラームでお知らせ
- ・ミュートボタンを長押しすると、アラームが一時停止します。
- ・ミュートボタンを短く押しすと、5分後に再度鳴ります。
- ・ミュートボタンを長押しすると、再度30分後鳴ります。

【オプション】

- ・オプションの取付金具をモバイルスタンドに取り付け可能です。



■ 開発元・販売店

株式会社ビットストロング 動物医療事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町1-1-10

秋間ビル6階

Tel:03-3437-5315 Fax:03-3437-5368

URL: <http://www.bitstrong.com>

E-Mail: imaging@bitstrong.co.jp