



サーモペット

Thermo Pet

大切なペットのために・・・

- ・眼・耳・肛門・歯茎などあらゆる部位で体温をかかる事ができます。
- ・エイミングシステム(マーク表示)で計測位置が正しいかが表示されます。
- ・直接体に触れないので衛生的です。
- ・ペットの体温のほか、食物・液体(1～55℃)の表面温度が計測できます。

簡単便利なエイミングシステム



遠すぎる場合

OK



近すぎる場合



体温計が正しく
垂直に保たれて
いる場合



パッケージ内容：サーモペット 1点・取扱説明書
-10～60℃の環境で保管して下さい
使用上の注意をよく読みお使い下さい

販売元

株式会社 ビットストロング 動物事業部

〒105-0013

東京都港区浜松町 1-1-10 秋間ビル 6F

TEL：03-3437-5315 FAX：03-3437-5368

URL：http://www.bitstrong.com

E-Mail：imaging@bitstrong.com

Facebook も公開中

<https://www.facebook.com/BSanimal>



サーモペット

Thermo Pet



取扱説明書 届出番号：元動薬第 520 号
動物用非接触式赤外線体温計



1	2	3	4	5	6	7
赤外線 導波管	赤外線 センサー	LED ライト	ペット ボタン	+/- ボタン	ホーム ボタン	ディス プレイ



クイックガイド

ペットボタン押したまま動物に近づけます



動物に近づけると二つの半円が見えます。眼の真ん中で半円がつながって円になれば、ペットボタンから指を離せば、体温がディスプレイに表示されます。

半円の調整例



近すぎる
場合




遠すぎる
場合




正 常

電池の交換方法


①コインなどを差し込みます

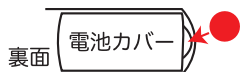

②矢印方向へひねります

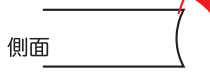


③カバーを外し電池を交換します

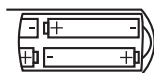

※カバーは硬く出ています、無理やり開けず上記の方法で行ってください

他の部位で測る場合

耳・肛門・歯茎など他の部位で測る場合も同様です。

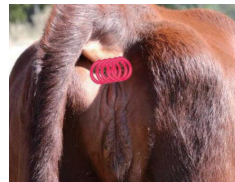

体温を正確に測るために

ペットボタン押して本体が眼の中央部に対して直角になるように調整し、それからボタンから指を離してください

※動物に対し正確な角度を保ってください
測定の際は体温計が室温に馴染んでいる事を確認してください。手動校正 (MQCS) を使えば、すぐに室温に適応させられます

MQCS の使い方

ペットボタンと +/- ボタンを同時に押すと、ディスプレイに「CAL」と表示されます
次にキャップを開け、本体を室内の壁や机に向けて ホームボタンを押します
照準ライト (円ライト) が正しく円になれば指を離しライトの点滅が終わるまで本体を持ち続けてください。ディスプレイに温度と「RE」が表示されれば温度が設定されます